



CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

Fecha:22/05/2025

Versión:2

GTC-FO-014

EQUIPO

APARATO DE SUCCIÓN ELÉCTRICA/UNIDAD PORTÁTIL ABSORCIÓN DE FLEMA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCIÓN FÍSICA								
1.1	Cubierta externa		X						
1.2	Mangueras		X						
1.3	Filtro Hidrofóbico		X						
1.4	Filtro Aire		X						
1.5	Botella(s) de almacenamiento y tapas.		X						
1.6	Ruedas (Si aplica)		X						
1.7	Pedal (Si aplica)		X						
1.8	Interruptor ON/OFF		X						
1.9	Dispositivo de protección de sobre-flujo		X						
1.10	Cable AC		X						
2	LIMPIEZA Y DESINFECCION (referirse al capítulo 6 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento)								
2.1	Use un paño suave empapado en un desinfectante suave para limpiar y desinfectar la cubierta externa	X							
2.2	Reemplazo del filtro aire	X							
2.3	Reemplazo de Filtro Hidrofóbico	X							
2.4	Desinfección de Botella de almacenamientos y tapas.	X							
2.5	Limpieza de tubería de succión	X							
2.6	Limpieza de pedal (Si aplica)	X							
3	MANTENIMIENTO (referirse al capítulo 6 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
3.1	Valoración de Rodamientos					X			
3.2	Lubricación de Pistones					X			
3.3	Inspección Eléctrica					X			
3.4	Verificación funcional del cable AC					X			
3.5	Verificación del Interruptor ON/OFF					X			
3.6	Verificación funcional del Vacuómetro					X			
3.7	Verificación de la Valvula Reguladora					X			
3.8	Verificación funcional del Pedal					X			
3.9	Verificación de la Valvula selectora (Si aplica)					X			
3.10	Verificación del dispositivo de protección desobre-flujo					X			
3.11	Prueba de Vacío Máximo					X			
3.12	Calibración (referirse a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.

Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.