



EQUIPO		CALENTADOR RADIANTE INFANTIL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCION FÍSICA								
1.1	Verificación del sensor de piel		X						
1.2	Verificación de acrílicos los 2 laterales y los 2 frontales		X						
1.3	Verificación del colchón y forro		X						
1.4	Verificación de la base cama y los 4 esquineros		X						
1.5	Verificación de la estructura metálica		X						
1.6	Verificación de la inclinación (Trendelemburg) (si aplica)		X						
1.7	Verificación de unidades Fototerapia (si aplica)		X						
1.8	Verificación del panel teclado y displays		X						
1.9	Verificación del porta chasis		X						
1.10	Verificación del controlador de temperatura		X						
1.11	Verificación del módulo calefactor		X						
1.12	Verificación del atril y bandejas laterales		X						
1.13	Verificación de las ruedas y sistemas de freno		X						
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (refierase a la sección 5 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
2.1	Limpie el sensor de piel	X							
2.2	Limpieza del módulo calefactor	X							
2.3	Limpieza del colchón y forro	X							
2.4	Limpieza de los paneles de acrílico (frontales y laterales).	X							
2.5	Limpieza del porta chasis de RX.	X							
2.6	Limpieza de las bandejas	X							
2.7	Limpieza de la base cuna.	X							
2.8	Limpieza de los módulos de fototerapia (Si aplica)	X							
2.9	Limpieza del atril	X							
2.10	Limpieza de la estructura metálica del equipo.	X							
2.11	Limpieza del controlador de temperatura	X							
3	MANTENIMIENTO (refierase a la sección 5 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
3.1	Verificación de alarma sin sensor de temperatura					X			
3.2	Verificación de alarma sin fluido eléctrico					X			
3.3	Verificación funcional en los 3 modos					X			
3.4	Verificación de la temperatura Máxima					X			
3.5	Verificación de la temperatura mínima					X			
3.6	Verificación de la alarma sonora					X			
3.7	Verificación alarma visible					X			
3.8	Verificación de alarma de desviación					X			
3.9	Verificación funcional de la alarma de falla potencia					X			
3.13	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								
OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado. Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento". Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.									