



Fecha:22/05/2025

Versión:2

GTC-FO-014

EQUIPO		CAMA HOSPITALARIA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCIÓN FÍSICA								
1.1	Verifique si alguna parte está suelta o no se encuentra en su forma usual.		X						
1.2	superficie		X						
1.3	Colchón		X						
1.4	Barandas (pieceras y braceras)		X						
1.5	Cabecera		X						
1.6	Ruedas		X						
1.7	Estructura metálica		X						
1.8	Frenos		X						
1.9	Control remoto		X						
2	LIMPIEZA - DESINFECCIÓN (refierase al capítulo 9 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
2.1	Mantenga limpio (incluyendo desinfección) del colchón , control remoto, superficie , piecera y cabecera.	X							
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 9 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
3.1	Verifique el cable de potencia.					X			
3.2	Verifique el estado funcional y panel teclado del control remoto					X			
3.3	Verifique que no exista ruidos anormales durante el funcionamiento de los motores.					X			
3.4	Lubricación de partes móviles					X			
3.5	Movimientos subida y bajada barandas					X			
3.6	Ascenso y descenso espaldar					X			
3.7	Inclinación lateral					X			
3.8	Movimiento de subida y de bajada					X			
3.9	Reversa trendelengurg					X			
3.10	Movimiento horizontal y vertical					X			
3.11	Mecanismo elevación					X			
3.12	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.