

		CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO						Fecha:22/05/2025	
								Versión:2	
								GTC-FO-014	
EQUIPO		DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		CUANDO SEA NECESARIO	ANTES DE SU USO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1	INSPECCIÓN FÍSICA								
1.1	Cubierta externa.				X				
1.2	Pantalla.				X				
1.3	Panel teclado.				X				
1.4	Cable (SI APLICA).				X				
1.5	Pads Multi Desf/Marc (Fecha de Venc).		X						
1.6	Baterías (Fecha de Venc).				X				
2	LIMPIEZA - DESINFECCIÓN (refierase al capítulo 11 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).								
2.1	Apague el equipo, desconecte los cables y quite la batería.	X							
2.1	Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y humedecido con limpiacristales.	X							
2.1	Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave, limpio y humedecido con limpiacristales.	X							
2.1	Retire toda la solución limpiadora con un paño seco después de la limpieza, si es necesario.	X							
2.1	Seque el equipo en un lugar fresco y ventilado.	X							
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 12 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).								
3.1	Realice la comprobación rutinaria y pruebas recomendadas.			X					
3.2	Realice la prueba automática.		X						
3.3	Realice la prueba de usuario.			x					
3.4	Realice las pruebas de seguridad eléctrica.							X	
3.5	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								X
OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado. Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento". Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.									