

EQUIPO		DOPPLER FETAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCIÓN FÍSICA refierase al capítulo 5 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
1.1	Verificación de cubiertas (Frontal, Trasera y Compartimento de las baterías).		X						
1.2	Verificación del transductor ultrasónico.		X						
1.3	Verificación del Cargador.		X						
1.4	Verificación del teclado.		X						
1.5	Verificación de la batería recargable ó alcalina (Si aplica).		X						
1.6	Verificación de la pantalla.		X						
1.7	Verificación del soporte de la sonda (si aplica).		X						
1.8	Verificación del soporte de carga (si aplica).		X						
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN refierase al capítulo 5 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
2.1	Use un paño suave empapado en un desinfectante suave para limpiar y desinfectar la superficie,incluyendo pantalla.	X							
2.2	Limpie y retire residuo de gel en el transdutor ultrasónico.	X							
3	MANTENIMIENTO refierase al capítulo 5 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
3.1	Revisión funcional de las teclas.					X			
3.2	Revisión funcional del transductor ultrasónico.					X			
3.3	Revisión funcional del apagado automático por inactividad.					X			
3.4	Revisión funcional del apagado automático del equipo al instalarlo en el soporte de la sonda (si aplica).					X			
3.5	Revisión funcional del cargador (Si aplica).					X			
3.6	Revisión funcional de la batería recargable ó alcalina (Si aplica).					X			
3.7	Revisión funcional del soporte de carga (si aplica).					X			
3.8	Verificación funcional del grabado y reproducción de sonidos.					X			
3.9	Verificación funcional del audio.					X			
3.10	Verificación funcional de la salida de audio (audifono) (Si aplica).					X			
3.11	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.					X			

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.

Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.