

		CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO						Fecha:22/05/2025	
								Versión:2	
								GTC-FO-014	
EQUIPO		ELECTROCARDIOGRAFO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCIÓN FÍSICA								
1.1	Cubierta externa		X						
1.2	Cable AC		X						
1.3	Cable del ECG		X						
1.4	Batería		X						
1.5	Set de electrodos ECG desechables.		X						
1.6	Pantalla (Táctil - S/A)		X						
1.6	Set de chupas ECG.		X						
1.7	Set de pinza ECG.		X						
2	LIMPIEZA (refierase al capítulo 13 del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).								
2.1	Limpie las superficies externas del electrocardiógrafo con un paño suave humedecido de las soluciones de limpieza aprobadas de la lista siguiente	X							
2.2	Limpie el cable de paciente con uno de los desinfectantes o productos de limpieza recomendados.	X							
2.3	Limpie los electrodos del pecho y de las extremidades.	X							
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 25 del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).								
3.1	Verificación de la batería .					X			
3.2	Limpieza de la cabeza térmica.					X			
3.3	Verificación del papel térmico					X			
3.4	Verificación funcional del cable ECG.					X			
3.5	Verificación de configuracion de los filtros de ECG.					X			
3.6	Calibración de la pantalla táctil (S/A).					X			
3.7	Verificación del panel teclado.					X			
3.8	Verificación funcional del cable Ac.					X			
3.9	Pruebas funcionales en modo batería.					X			
3.10	Pruebas funcionales conectado AC					X			
3.11	Pruebas de seguridad eléctrica						X		
3.12	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								
OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado. Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento". Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.									