

		CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO						Fecha:22/05/2025	
								Versión:2	
								GTC-FO-014	
EQUIPO		LAMPARA QUIRURGICA DE LUZ SIN SOMBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCION FÍSICA								
1.1	Revisión satélites		X						
1.2	Bombillos / Leds (Si aplica)		X						
1.3	Socket (Si aplica)		X						
1.4	Panel de teclado		X						
1.5	Manijas esterilizables		X						
1.6	Filtros del satélite		X						
1.7	Módulos fuentes		X						
1.8	Control Remoto		X						
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (refierase al capítulo 1 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
2.1	Limpie el sistema usando un paño empapado en detergente de superficies, de acuerdo a las instrucciones recomendadas por el fabricante.	X							
2.2	Desinfecte el sistema usando un paño empapado en desinfectante, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, luego Use un paño para enjuagar con agua limpia para remover los residuos.	X							
2.3	Las manijas deben ser sumergidas por 15 minutos para permitir que la solución actúe, entonces limpie con la mano con un cepillo suave y un paño libre de fibras sueltas.Si queda aún suciedad, repita la limpieza o use un proceso de limpieza ultrasónica.	X							
3	MANTENIMIENTO (refierase al capitulo 3,4 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).								
3.1	Ajuste de frenado/ fricción					X			
3.2	Ajuste del Brazo de Resorte					X			
3.3	Revisión y cambio de bombillos / Leds (Si aplica)					X			
3.4	Revisión y cambio del socket (Si aplica)					X			
3.5	Revisión del panel de teclado					X			
3.6	Revisión de las manijas esterilizables					X			
3.7	Revisión y limpieza de los filtros del satélite					X			
3.8	Revisión funcional del Control Remoto					X			
3.9	Revisión funcional de los modulos fuentes					X			
3.10	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								
OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.									
Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".									
Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.									