

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

Fecha:22/05/2025

Versión:2

GTC-FO-014

### EQUIPO

### MONITOR DE PRESIÓN SANGUÍNEA AMBULATORIO-MAPA

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                            | PERIODICIDAD      |         |         |            |           |       |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------|-------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                        | DESPUES DE SU USO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | CADA 2 AÑOS | CADA 5 AÑOS |
| 1    | <b>INSPECCIÓN FÍSICA</b>                                                                                                                                                                                               |                   |         |         |            |           |       |             |             |
| 1.1  | Cubierta externa                                                                                                                                                                                                       |                   | X       |         |            |           |       |             |             |
| 1.2  | Baterías                                                                                                                                                                                                               |                   | X       |         |            |           |       |             |             |
| 1.3  | Estuche y correa de transporte                                                                                                                                                                                         |                   | X       |         |            |           |       |             |             |
| 1.4  | Manguera NIBP                                                                                                                                                                                                          |                   | X       |         |            |           |       |             |             |
| 1.5  | Brazalete NIBP                                                                                                                                                                                                         |                   | X       |         |            |           |       |             |             |
| 1.7  | Memoria SD                                                                                                                                                                                                             |                   | X       |         |            |           |       |             |             |
| 1.8  | Cable de conexión (S/A)                                                                                                                                                                                                |                   | X       |         |            |           |       |             |             |
| 2    | <b>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (refierase al capítulo 11 del Manual de Uso, Oper, Inst y Mantenimiento).</b>                                                                                                               |                   |         |         |            |           |       |             |             |
| 2.1  | Use un paño suave empapado en un desinfectante suave para limpiar y desinfectar la superficie,incluyendo pantalla. Retire los excesos de humedad con un paño seco y limpio.                                            | X                 |         |         |            |           |       |             |             |
| 2.2  | Limpie la manguera y brazalete NIBP con un desinfectante suave. Retire los excesos de humedad con un paño seco y limpio.                                                                                               | X                 |         |         |            |           |       |             |             |
| 3    | <b>MANTENIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |         |         |            |           |       |             |             |
| 3.1  | Verificación funcional del brazalete                                                                                                                                                                                   | X                 |         |         |            |           |       |             |             |
| 3.2  | Verificación de las baterías                                                                                                                                                                                           | X                 |         |         |            |           |       |             |             |
| 3.3  | Tiempo de grabación (1,2,3, 4 días o cont)                                                                                                                                                                             | X                 |         |         |            |           |       |             |             |
| 3.4  | Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper, Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado. |                   |         |         |            |           | X     |             |             |

**OBSERVACIONES:** Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.

Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: [serviciotecnico@novamedicasas.com](mailto:serviciotecnico@novamedicasas.com) o al celular 3004187465.