

		CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO							Fecha:22/05/2025	
									Versión:2	
									GTC-FO-014	
EQUIPO		OXIMETRO DE PULSO								
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD								
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS	
1	INSPECCIÓN FÍSICA									
1.1	Verificación del estado de las cubiertas del equipo		X							
1.2	Verificación del estado del sensor de saturación SPO2		X							
1.3	Verificación de la batería AA		X							
1.4	Verificación del panel teclado		X							
1.5	Verificación de la pantalla		X							
1.6	Verificación del cargador de oxímetro (si aplica)		X							
1.7	Verificación del cable Ac (si aplica)		X							
1.8	Verificación de la batería recargable (si aplica)		X							
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (refierase al capítulo 6 del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).									
2.1	Limpie la superficie exterior del equipo, incluida la pantalla, con un paño suave humedecido con la solución de limpieza, hasta que no queden restos de agentes contaminantes visibles.	X								
2.2	Limpieza del sensor de Spo2	X								
2.3	Limpieza del cable AC (si aplica)	X								
2.4	Limpieza del cargador de oxímetro (si aplica)	X								
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 6 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).									
3.1	Verificación funcional del panel teclado.							X		
3.2	Verificación funcional del sensor spo2.							X		
3.3	Verificación de la pantalla							X		
3.4	Verificación funcional del parlante							X		
3.5	Verificar si el sistema de alarma funciona correctamente							X		
3.6	Verificación funcional del cable Ac (si aplica)							X		
3.7	Verificación funcional del cargador de oxímetro (si aplica)							X		
3.8	Verificar el rendimiento de la batería (carga y descarga)				X					
3.9	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.									
OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado. Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento". Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.										