

EQUIPO		PC ECG PRUEBA DE ESFUERZO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCIÓN FÍSICA (refierase al capítulo 11 del manual de usuario)								
1.1	Cubierta externa de la caja receptora		X						
1.2	Cubierta externa de la caja emisora		X						
1.3	Correa cargador de la caja emisora		X						
1.4	Cable Conexión (S/A)		X						
1.5	Llave Usb o Client code (S/A)		X						
1.6	Pantalla		X						
1.7	Baterías		X						
1.8	Banda trotadora		X						
1.9	Cable ECG 10 leads		X						
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (refierase al capítulo 11 del manual de usuario)								
2.1	Limpie la cinta sin fin con un paño suave limpio para eliminar el polvo, la humedad y las manchas de sudor.	X							
2.2	Limpie el pasamanos de la cinta sin fin con un paño suave limpio humedecido en detergente neutro no corrosivo.	X							
2.3	Limpie el polvo alrededor de la cinta sin fin con una aspiradora.		X						
2.4	Limpie el cable de paciente con un desinfectante suave.	X							
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 11 del manual de usuario)								
3.1	Engrase los tornillos						X		
3.2	Valoración del estado físico y funcional de la cinta sin fin.						X		
3.3	Compruebe el grado de ajuste de la banda de trote.		X						
3.4	Compruebe que el interruptor de parada de emergencia funciona correctamente.		X						
3.5	Verificación funcional de la Llave Usb o Client code (S/A)						X		
3.6	Verificación del panel teclado						X		
3.7	Verificación funcional de la caja emisora y receptora.						X		
3.8	Verificación funcional del cable conexión (S/A)						X		
3.9	Verificación funcional del software prueba de esfuerzo						X		
3.10	Verificación funcional del cable Ecg 10 leads (Frecuencia Cardíaca 30-60-120 LPM)						X		
3.11	Verificación de las baterías		X						
3.13	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper, Inst y Mantenimiento para este equipo, sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.