

EQUIPO		SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE ULTRASONIDO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD						
		ANTES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS
1	INSPECCIÓN FÍSICA							
1.1	Cubiertas externas.		X					
1.2	Cable ac.		X					
1.3	Pantalla.		X					
1.4	Pantalla táctil (S/A).		X					
1.5	Panel de teclado y trackball.		X					
1.6	Panel de control.		X					
1.7	Panel teclado táctil (S/A).	X						
1.8	Cables de conexión (Cable BNC, Cable usb, cable remoto (S/A)).		X					
1.9	Ruedas y frenos.(S/A)		X					
1.10	Transductores de ultrasonidos.	X						
1.11	Conectores de transductores.		X					
1.12	Movimiento de pantalla	X						
1.13	Soporte móvil (S/A).				X			
1.14	Unidad de DVD.(S/A)		X					
1.15	Calentador de gel (S/A).		X					
1.16	Video impresora B/W.(S/A)		X					
1.17	Puertos periféricos(USB,VGA,HDMI,S-VIDEO,LAN,DICOM 3, BNC,Remoto). (S/A)		X					
2	LIMPIEZA (refierase al capítulo 13 de Mantenimiento del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).							
2.1	Limpieza de la superficie del sistema.			X				
2.2	Limpieza del filtro aire.(S/A)				X			
2.3	Limpieza del trackball			X				
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 13 de Mantenimiento del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).							
3.1	Verificación funcional del cable AC.					X		
3.2	Verificación funcional del botón de encendido.					X		
3.3	Verificación funcional de la batería de respaldo (S/A).				X			
3.4	Verificación funcional de los cables de conexión (Cable BNC, Cable usb, cable remoto (S/A)).					X		
3.5	Verificación funcional de la pantalla.					X		
3.6	Verificación funcional del panel teclado y trackball.					X		
3.7	Verificación del panel teclado táctil (S/A).					X		
3.8	Seguridad eléctrica						X	
3.9	Verificación de las ruedas y frenos.(S/A)					X		
3.10	Verificación funcional del ajuste altura panel teclado (S/A).					X		
3.11	Verificación funcional del ajuste altura de la pantalla (S/A)					X		
3.12	Verificación funcional de los puertos periféricos (USB,VGA,HDMI,S-VIDEO,LAN,DICOM 3, BNC,Remoto). (s/A)					X		
3.13	Verificación funcional de los transductores de ultrasonido con el equipo.					X		
3.14	Verificación funcional de la unidad de DVD. (S/A)					X		
3.15	Verificación funcional de la video impresora B/W (S/A).					X		
3.16	Realice copia de seguridad y libere espacio en el disco duro.					X		
3.17	Realice grabación de imágenes.					X		
3.18	Verificación funcional de los modos y estudios de trabajos.					X		
3.19	Verificación funcional del sistema de ajuste altura del soporte ecografo (S/A).					X		
3.20	Verificación funcional del parlante.					X		
3.21	Verificación funcional del modulo wifi (S/A).					X		
3.22	Verificación funcional del modulo ECG (S/A).					X		
3.23	Verificación funcional del cable ECG (S/A)					X		
3.24	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.							

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.

Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.