

		CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO					Fecha:22/05/2025	
							Versión:2	
							GTC-FO-014	
EQUIPO		VENTILADOR MECÁNICO/ TRANSPORTE						
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD						
		DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS
1		INSPECCIÓN FÍSICA						
1.1	Trampas de agua, aire y oxígeno (S/A)	X						
1.2	Manguera de conexión aire y oxígeno	X						
1.3	Pantalla			X				
1.4	Pantalla táctil (S/A)					X		
1.5	Adaptador cargador AC (S/A)	X						
1.6	Cable AC	X						
1.7	Brazo de circuito (S/A)			X				
1.8	Circuito de paciente	X						
1.9	Estado del soporte o carro de transporte (S/A)	X						
1.10	Panel teclado (S/A)	X						
1.11	Perilla de ajuste (S/A)	X						
1.12	Batería de respaldo					X		
1.13	Válvula exhalatoria (S/A)	X						
1.14	Cobertor de membrana (S/A)	X						
1.15	Membrana exhalatoria (S/A)	X						
1.16	Línea proximal (S/A)	X						
1.17	Cilindro de oxígeno (S/A)					X		
1.18	Regulador de oxígeno (S/A)					X		
1.19	Filtro aire (S/A)			X				
1.20	Sensor de flujo externo (S/A)	X						
1.21	Interruptor de encendido/apagado	X						
1.22	Sensor O2 (S/A)	X						
1.23	Módulo CO2 (S/A)					X		
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (refierase al capítulo 11 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).							
2.1	Limpiar las superficies externas incluye la carcasa, cable AC y las mangueras con un paño húmedo con desinfectante intermedio o de alta eficacia y con un paño seco que no suelte pelusa seque las partes.	X						
2.2	Refierase al capítulo 11.1, para mayor detalle de la limpieza de los accesorios y agentes desinfectantes permitidos.		X					
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 12 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).							
3.1	Verifique la funcionalidad del cable Ac y adaptador Ac (S/A).					X		
3.2	Verificación funcional ó calibración (S/A) de la batería de respaldo					X		
3.3	Verificación funcional de la pantalla, panel teclado, perilla de ajuste (S/A), pantalla táctil (S/A).					X		
3.4	Verifique la conexión de gases al equipo.					X		
3.5	Verificación de circuito paciente , sensor de flujo externo (S/A), línea proximal (S/A),membrana exhalatoria, cobertor de membrana , módulo exhalatorio ó válvula exhalatoria y test fuga (S/A).					X		
3.6	Cambio de kit mantenimiento teniendo en cuenta el tiempo estipulado por el fabricante.		X					
3.7	Verificación de las alarmas del sistema.					X		
3.8	Limpieza de componentes internos					X		
3.9	Verificación, ajuste y lubricación de las conexiones y componentes neumáticos.					X		
3.10	Prueba de sensor de oxígeno ó Fio2 (21, 50 y 100%)					X		

3.11	Calibración del sensor de oxígeno (S/A)					X		
3.12	Verificación de Volumen tidal					X		
3.13	Verificación de Volumen tidal expirado					X		
3.14	Verificación de Volumen tidal inspirado					X		
3.15	Verificación funcional del compresor interno (S/A)					X		
3.16	Verificación de frecuencia respiratoria 12 y 20 rpm					X		
3.17	Horas de servicio (S/A)					X		
3.18	Verificación y ajuste tornillería de soporte, carro de transporte y brazo soporte circuito. (S/A)					X		
3.19	Verificación funcional del módulo Co2 (S/A)					X		
3.20	Calibración (refiérase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.						X	

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.
Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deber realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como la calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.