

		CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO						Fecha:22/05/2025	
								Versión:2	
								GTC-FO-014	
EQUIPO		VIDEOCOLPOSCOPIO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD							
		ANTES DE SU USO	POR NECESIDAD	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCIÓN FÍSICA (refierase al capítulo 6 del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).								
1.1	Revise el sistema y los accesorios para ver si hay algún signo visible de deterioro que pueda afectar a la seguridad de la paciente o del operador.	X							
1.2	Revise los cables de alimentación en busca de daños y para ver la conexión.	X							
1.3	Revise si el sistema funciona correctamente.	X							
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (refierase al capítulo 6 del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).								
2.1	Limpieza de la superficie externa Nota: Asegúrese de que no se filtre líquido dentro de la carcasa y de que la superficie esté limpia al final.	X							
2.2	Limpieza del lente Nota: Asegúrese de que no se filtre líquido dentro de la carcasa y de que la superficie esté limpia al final.	X							
2.3	Limpie el dispositivo antes de desinfectarlo		X						
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 6 del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).								
3.1	Cuando la cámara no esté en uso, desenchúfela de la fuente de poder y cubra el lente con la cubierta para polvo.		X						
3.2	No toque la lente con los dedos. La grasa de los dedos puede dañar la capa de revestimiento de la lente y la huella dactilar también puede afectar a la calidad de la imagen.	X							
3.3	Mantenga la lente seca, evite exponerla a temperaturas extremas y a humedad, y protéjala de la luz solar directa.		X						
3.4	Realice copia digital de los estudios realizados y borre los originales, esto es para liberar espacio en el disco duro del computador.		X						
3.13	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								
OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.									
Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".									
Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.									