

EQUIPO
ILUMINADOR DE VENAS
PERIODICIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	DESPUES DE SU USO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CADA 2 AÑOS	CADA 5 AÑOS
1	INSPECCIÓN FÍSICA (refierase al capítulo 9 del Manual de Uso, Oper, Inst y Mantenimiento).								
1.1	Verificación física (No hay grietas, ni daño)	x	x						
1.2	Comprobación del adaptador y del cable de alimentación	x	x						
1.3	Verificación de la batería interna	x	x						
1.4	Comprobación de la precisión	x	x						
1.5	Verificar todas las partes selladas, la instalación parece estar normal y no hay daño material.		x						
2	LIMPIEZA - DESINFECCIÓN - ESTERILIZACIÓN (refierase al capítulo 8 del Manual de Uso, Oper, Inst y Mantenimiento).								
2.1	Limpieza externa y desinfección	x							
2.2	Antes de limpiar y desinfectar, apague el dispositivo y desconecte el cable de alimentación.	x							
2.3	Use guantes y una mascarilla para evitar salpicaduras de contaminantes en la piel durante la limpieza y desinfección.	x							
2.4	Prepare varias gasas médicas suaves, un recipiente para detergente y un recipiente para desinfectante.	x							
2.5	1. Sumerja completamente una gasa suave en una solución de detergente neutro o ligeramente alcalino, escúrrala y úsela para limpiar la superficie del dispositivo. 2. Limpie todas las superficies del dispositivo en orden hasta eliminar todos los contaminantes. 3. Aplique unas gotas de alcohol etílico en una gasa y úsela para limpiar suavemente la superficie del lente en la misma dirección. 4. Asegúrese de que todos los bordes y esquinas del dispositivo estén completamente limpios. 5. Después de la limpieza, utilice una gasa seca para eliminar los residuos de detergente.	x							
2.6	Para consultar los detergentes recomendados para el dispositivo consulte manual de usuario capítulo 8	x							
3	MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 9 del Manual de Uso, Oper, Inst y Mantenimiento).								
3.1	Verifique el cable de potencia.					x			
3.2	Verifique el estado de las teclas					x			
3.3	Verifique que no exista ruidos anormales					x			
3.4	Verifique el estado de la pantalla					x			
3.5	Verificación de la batería interna					x			

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.

Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.